

소모품(공산품)

1. 품목정보

모 델 명	μ TASWako Wash Solution	
포장단위	용기 등의 기재사항 참조.	
제조번호	용기 등의 기재사항 참조.	
제조연월	용기 등의 기재사항 참조.	
수입원	상 호	아산제약(주)
	주 소	서울특별시 동대문구 청계천로 485
	전화번호	02-3290-5700
	F a x	02-3290-5750
제조원	상 호 (국가)	제조의뢰자 : FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(일본)
		제조자 : 1. FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation Mie Plant(일본) 2. FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation Mie Komono Plant(일본)

2. 구성

번호	명칭	세부구성
1	μ TASWako Wash Solution	60 ml x 2 bottles

3. 사용목적

본 제품은 μ TASWako AFP-L3, μ TASWako PIVKA II 키트 전용 장비인 μ TASWako i30의 세척용액이다.

4. 보관방법 및 사용기한

본 제품은 2~10℃에 보관한다. (사용기한: 제조일로부터 18개월)

5. 사용방법

해당 장비의 사용자매뉴얼에 따라 사용한다.

7. 사용 시 주의사항

- 1) μ TASWako i30에 장착하여 사용하고 이 장비 이외의 장비에는 사용하지 않는다.
- 2) 시약이 잘못하여 눈이나 입에 들어가거나 피부에 묻었을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고 필요 시 의사의 진찰을 받는다.
- 3) 본 제품(μ TASWako Wash Solution)은 pH가 11이상인 알칼리성 용액이다.
- 3) 사용 시 일회용 장갑을 착용한다.
- 4) 본 제품을 지정된 조건에서 보관하고 사용기한이 넘은 것을 사용하지 않는다.
- 5) 잘못하여 동결시킨 제품을 사용하지 않는다. 사용 시 올바른 결과를 얻을 수 없다.
- 4) 본 제품을 개봉 후에는 즉시 장비에 설치하여 가능한 한 빨리 사용한다. 보존하는 경우, 장치 내에서 보존하며 이 때 보냉 기능이 작동되어야 한다.
- 5) 본 제품의 용기나 부속품을 다른 목적으로 사용하지 않는다.
- 6) 폐기 시 관련 규정에 따라 적절히 폐기한다.