

소모품(공산품)

1. 품목정보

| | | |
|------|-----------------------------|--|
| 모델명 | μ TASWako Wash Solution | |
| 포장단위 | 용기 등의 기재사항 참조. | |
| 제조번호 | 용기 등의 기재사항 참조. | |
| 제조연월 | 용기 등의 기재사항 참조. | |
| 수입원 | 상 호 | 아산제약(주) |
| | 주 소 | 서울특별시 동대문구 창계천로 485 |
| | 전화번호 | 02-3290-5700 |
| | F a x | 02-3290-5750 |
| 제조원 | 상 호 | 제조사(본사) : FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(일본) |
| | (국가) | 제조사(공장) : FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Mie Office Komono Site(일본) |

2. 구성

| 번호 | 명칭 | 세부구성 |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1 | μ TASWako Wash Solution | 60 ml x 4 |

3. 사용목적

본 제품은 μ TASWako AFP-L3, μ TASWako PIVKA II 키트 전용 장비인 μ TASWako i30의 세척용액이다.

4. 보관방법 및 사용기한

본 제품은 2~10℃에 보관한다. (사용기한: 제조일로부터 18개월)

5. 사용방법

해당 장비의 사용자매뉴얼에 따라 사용한다.

6. 사용 시 주의사항

- μ TASWako i30에 장착하여 사용하고 이 장비 이외의 장비에는 사용하지 않는다.
- 시약이 잘못하여 눈이나 입에 들어가거나 피부에 묻었을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고 필요 시 의사의 진찰을 받는다.
- 본 제품(μ TASWako Wash Solution)은 pH가 11이상인 알칼리성 용액이다.
- 사용 시 일회용 장갑을 착용한다.
- 본 제품을 지정된 조건에서 보관하고 사용기한이 넘은 것을 사용하지 않는다.
- 잘못하여 동결시킨 제품을 사용하지 않는다. 사용 시 올바른 결과를 얻을 수 없다.
- 본 제품을 개봉 후에는 즉시 장비에 설치하여 가능한 한 빨리 사용한다. 보존하는 경우, 장치 내에서 보존하며 이 때 보냉 기능이 작동되어야 한다.
- 본 제품의 용기나 부속품을 다른 목적으로 사용하지 않는다.
- 폐기 시 관련 규정에 따라 적절히 폐기한다.