

Asan Auto Multi Calibrator

면역검사범용정도관리물질 II

1. 제조번호 및 사용기한 - 외장(포장박스)표시사항 참조

2. 포장단위(시약 구성내용)

제 품 명	고유번호	품목류명	규 격
Asan Auto Multi Calibrator	CA6461-K	표준혈청	3mL용 x 2

3. 사용목적 - 검사장비의 성능 검증과 검사결과의 확인을 위해 사용되는 물질

4. 사용방법

- 1) 본 제품 스크류캡을 열고, 고무마개를 천천히 제거합니다. 동결건조 분말이 날리지 않도록 주의합니다.
- 2) 검 교정이 되어있는 피펫을 사용하여 본 제품 1병에 정제수를 정확히 3mL가하여 완전히 용해될 때까지 30분간 실온에 방치합니다.
흔들어 용해하지 않고 천천히 전도 혼합하여 용해합니다.
- 3) 완전히 녹은 것을 확인하고 즉시 사용하는 것을 원칙으로 합니다.
- 4) 본 제품은 미개봉시 냉장(2~8°C)에서 표시된 사용기한까지 안정합니다. -20°C 냉동 보관 시 4주간 (한번 냉동 시) 안정합니다.
(단, 면역검사시약 Bilirubin 등은 제외)

5. 사용 시 주의사항

- 1) 본 품은 체외진단용으로만 사용하십시오. 그 외에 다른 용도로 사용하지 않습니다.
- 2) 본 품은 보관 조건에 따라 보관하고, 사용기한이 경과하였거나 잘못 동결한 경우에는 사용하지 말아 주십시오.
- 3) 본 품은 인간 유래 물질이 포함되어 있으며 HBs항원, HIV검사에서 음성으로 확인된 원료를 사용하여 제조하였지만, 사용 시 감염성이 있는 것과 동일한 방법으로 충분히 주의하여 사용하여 주십시오.
- 4) 어떤 방법도 감염원이 없다는 것에 대한 완전한 확신을 줄 수 없기 때문에 이러한 인간 유래 물질과 모든 환자 샘플은 유해 폐기물로 폐기하여 주십시오.
- 5) 실수로 눈이나 입으로 들어가거나 피부에 닿았을 경우 즉시 물로 행구고, 필요한 경우 의사의 조치를 받으십시오.
- 6) 각종 자동분석장치에 사용할 경우에는 반드시 분석장치의 설명서를 주의 깊게 읽고 사용하십시오.
- 7) 동결된 물질은 실온에서 충분히 녹인 후 사용하며, 재 동결 후 사용하지 마십시오.
- 8) 반드시 해당하는 제조번호(Lot)의 참고치를 사용하여 주십시오.
- 9) 본 제품의 참고치는 측정장비, 측정기종, 제조번호(Lot)에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다.

6. 보관조건 2~8°C 보존

7. 작성연월일: 2019.08.22 개정연월일 : 2020.08.10

8. 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다. 연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750

