

Asan Auto Cystatin C LTIA Standard(체외진단 의료기기)

(혈청, 혈장 중의 Cystatin C 측정용, 라텍스응집면역비탁법)

● 사용목적

본 품은 Asan Auto Cystatin C LTIA 시약의 검량용으로 사용하는 시약입니다.

● 사용방법

- 1) 본 품을 그대로 사용합니다.
- 2) 개봉 후에는 되도록 빨리 사용하고, 사용 후에는 건조되지 않도록 밀봉하여 냉장보관 합니다.

● 역가

- 1) Lot.별로 각 vial의 라벨에 표기되어 있으며, Lot.간에 차이가 있습니다.

● 보관조건 및 사용기한

개봉여부	보관조건	유효기간
미개봉	냉장(2~8℃)	제조 후 18개월
개봉	냉장(2~8℃)	개봉 후 4주

● 사용상의 주의사항

- 1) 본 품은 체외진단용으로만 사용해주시요.
- 2) 본 품은 보관 조건에 따라 보관하고, 사용기한이 경과하였거나 잘못 동결한 경우에는 사용하지 말아 주십시오.
- 3) 당사의 측정용 시약의 사용방법은 의료기기 제인 19-4569호를 참조하여 주십시오.

● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2019년05월17일 개정연월일 : 2020년07월10일

● 포장단위(시약 구성 내용)

제 품 명	고유번호	품목류명	규 격
Asan Auto Cystatin C LTIA Standard 1	ST6401-K	관리혈청	1mL x 1
Asan Auto Cystatin C LTIA Standard 2		관리혈청	1mL x 1
Asan Auto Cystatin C LTIA Standard 3		관리혈청	1mL x 1
Asan Auto Cystatin C LTIA Standard 4		관리혈청	1mL x 1
Asan Auto Cystatin C LTIA Standard 5		관리혈청	1mL x 1

● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.
연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750